

## Инструкция по применению

### Медицинских носков с противомикробными, противогрибковыми свойствами forA

**Назначение:** защита ног от бактериальной и грибковой инфекции. Обеспечивают высокие гигиенические свойства, не допускают появления неприятного запаха. Помогают уменьшить повышенную потливость ног. Обеспечивают ногам свежесть и комфорт.

**В профилактических целях:** предназначены для профилактики грибковых и гнойничковых заболеваний кожи ног. Обладая фунгицидным и бактерицидным действием, защищают кожу ног от инфекций. Особенно рекомендованы людям, которые много времени проводят в обуви, активно занимаются спортом, страдают повышенной потливостью ног. В результате применения прерывается путь передачи грибковой инфекции в момент контаминации грибом, что исключает заражение.

**В медицинских целях:** предназначены для больных с пиодермией и микозами кожи ног и ногтей для снижения и подавления микробной и грибковой микрофлоры. Обеспечивают постоянное противомикробное и противогрибковое воздействие на кожу в процессе применения, что способствует позитивной динамике в процессе лечения. После выздоровления рекомендуются в качестве профилактического средства для предотвращения рецидивов.

**Применение:** одевать на чистые ноги и носить в течение всего дня. Стирать в нейтральных моющих средствах при температуре 35-40°C, не стирать хозяйственным мылом. После стирки отжать и высушить. Изделия сохраняют свои противомикробные, противогрибковые свойства на протяжении 30 стирок.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов сырья.

Хранение: изделия хранят в чистых, сухих помещениях при температуре от +3 до +25°C

Утилизация: с бытовыми отходами

Срок хранения: 3 года



Состав и дату производства-см. на упаковке.

В упаковке: 1 пара

Ваши вопросы и пожелания можно отправлять производителю.

Производитель: SIA ITLA.LV, Маскавас 250, Рига, LV-1063, t.+371 67112986, [itla@itla.lv](mailto:itla@itla.lv),

[www.itla.lv](http://www.itla.lv)